

Інструкція для медичного застосування виробу медичного призначення

Назва виробу медичного призначення

Розчин багатофункціональний з Алое вера AVIZOR ALVERA для всіх типів м'яких контактних лінз, особливо силікон-гідрогелевих у флаконі 60,0 мл, 100,0 мл, 350,0 мл

Склад і опис виробу

Полуксамер, ЕДТА, Алое вера і Полігексанід 0,0002% в буферному, фізіологічному, стерильному розчині.

Розчин багатофункціональний з Алое вера AVIZOR ALVERA для всіх типів м'яких контактних лінз, особливо силікон-гідрогелевих.

Очищення і видалення відкладень (протеїнів і ліпідів) - дезінфекція (ефективний відносно бактерій, грибків і акантамеби) - ополіскування - зберігання - зволоження - змазування.

**Найменування і (або) товарний знак організації-виробника
AVIZOR S.A.**

Галузь застосування
Офтальмологія

Спосіб застосування

1. Перед тим, як доторкнутися до ваших контактних лінз, вимийте ваші руки водою з милом.
2. Покладіть лінзи на долоню, капніть кілька крапель розчину Avizor Alvera і протягом декількох секунд акуратно потріть її з обох сторін.
3. Ополосніть ваші лінзи з обох сторін розчином Avizor Alvera мінімум протягом 5 секунд.
4. Помістіть кожну лінзу в свій осередок контейнера і переконайтеся в тому, що лінзи повністю занурені в розчин Avizor Alvera. Закрийте контейнер і обережно потрясіть його протягом декількох секунд.
5. Для забезпечення повної дезінфекції лінзи поміщують в розчин Avizor Alvera не менше, ніж на 6 годин (або на всю ніч).
6. По завершенні процесу дезінфекції ви можете відразу ж надіти ваші лінзи (на очі), або ж попередньо обполоснути їх розчином Avizor Alvera.



7.Промийте контейнер для лінз розчином Avizor Alvera і залиште сушитися на повітрі.

Запобіжні заходи

Після розкриття флакон можна використовувати тільки протягом наступних 90 днів.
Після кожного використання щільно закривайте флакон.