

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Розчин універсальний Біотру (Biotrue) по догляду за м'якими контактними лінзами у флаконах в комплекті з контейнером для зберігання контактних лінз і без контейнера

Кондиціонування, очищення, видалення протеїнових відкладень, дезінфекція, промивання і зберігання контактних лінз.

Розчин універсальний Біотру (Biotrue) по догляду за м'якими контактними лінзами (гідрогелевими і силікон-гідрогелеві).

Використовується: для кондиціонування, очищення, видалення протеїнових відкладень, дезінфекції, промивання і зберігання контактних лінз. Розчин виконує всі ці елементарні етапи. Даний щоденний режим обробки рекомендований Bausch + Lomb для безпечного і комфортного носіння контактних лінз.

ЕТАП 1: Додати мінімум по 3 краплі Універсального розчину Біотру (Biotrue) на кожену поверхню лінзи і обережно протерти протягом 20 секунд.

ЕТАП 2: Ретельно промити кожену сторону лінзи протягом 5 секунд Універсальним розчином Біотру (Biotrue).

ЕТАП 3: Помістити очищені контактні лінзи в контейнер для лінз і наповнити свіжим Універсальним розчином Біотру (Biotrue). Витримати мінімум 4 години. Пам'ятайте, що завжди потрібно використовувати свіжий розчин. Виливайте розчин з контейнера для лінз після кожного використання.

Ваші лінзи тепер готові до носіння. Якщо будь-які відкладення залишаться на Ваших контактних лінзах, промийте їх Універсальним розчином Біотру (Biotrue) перед одяганням. Завжди дотримуйтесь інструкцій лікаря-офтальмолога. На основі індивідуальних особливостей Вашої сльози і режиму носіння лінз, лікар-офтальмолог може рекомендувати додаткові продукти і процедури. Якщо в даний момент Ви не носите контактні лінзи, зберігайте їх в закритому контейнері для лінз. Не зберігайте Ваші лінзи в сольовому розчині замість Універсального розчину Біотру (Biotrue). Сольовий розчин не дезінфікує лінзи. Лінзи можуть зберігатися в закритому контейнері до моменту надягання максимум до 30 днів. Якщо Ви зберігаєте Ваші лінзи більш тривалий період часу, вони повинні бути очищені і дезінфіковані свіжим Універсальним розчином Біотру (Biotrue) перед одяганням.

Склад: стерильний ізотонічний розчин, який містить гіалуронан (натрію гіалуронат), сульфобетаїн, Полоксамін, борну кислоту, борат натрію, едетат динатрію і хлорид натрію, поліамінопропілбігуанідін 0.00013%, полікватерніум 0.0001%; допоміжні речовини: соляна кислота, натрію гідроксид, дистильована вода

Властивості:

При щоденному використанні Універсальний розчин Біотру (Biotrue) руйнує протеїни, очищає, розпушує, видаляє відкладення біоплівки і нальоти на м'яких контактних лінзах. Універсальний розчин Біотру (Biotrue) дезінфікує контактні лінзи, знищуючи патогенні мікроорганізми. Поки Ваша лінза знаходиться в розчині, зволожуючий компонент обволікає лінзу для комфортного носіння протягом всього дня. Універсальний розчин Біотру (Biotrue) також може використовуватися для промивання лінз.

Переваги Біотру (Biotrue):

Універсальний розчин Біотру (Biotrue) натхненний біологією ваших очей. Універсальний розчин Біотру (Biotrue) містить змазуючу речовину, що входить до складу біологічної тканини Ваших очей і збалансований до відповідності рН сльози здорового ока. Універсальний розчин Біотру (Biotrue) допомагає захистити від денатурації деякі протеїни сльози для підтримки чистоти лінз і запобігає утворенню відкладень, які можуть

викликати дискомфорт і скоротити час носіння лінзи. Зберігаючи лінзи зволоженими і чистими, Універсальний розчин Біотру (Biotrue) забезпечує комфортне носіння контактних лінз протягом усього дня. Універсальний розчин Біотру (Biotrue) працює подібно Вашим очам.

Показання: Універсальний розчин Біотру (Biotrue) призначений для кондиціонування, очищення, видалення протеїнових відкладень, промивання, дезінфекції та зберігання м'яких контактних лінз (гідрогелевих, силікон-гідрогелевих), відповідно до рекомендацій лікаря-офтальмолога.

Протипоказання (Причини для невикористання):

Якщо у вас алергія на будь-який компонент універсального розчину, не використовуйте його.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ПРОБЛЕМИ З КОНТАКТНИМИ ЛІНЗАМИ І ПРОДУКЦІЄЮ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ЛІНЗАМИ, НЕДОТРИМАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЛІКАРЯ-ОФТАЛЬМОЛОГА МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО ІНФІКУВАННЯ РОГІВКИ І / АБО ВИРАЗЦІ І ВТРАТИ ЗОРУ.

Важливо, щоб Ви слідували вказівкам Вашого лікаря-офтальмолога, і всім інструкціям, наведеним на маркуванні для правильного використання лінз і продукції по догляду за лінзами, включаючи контейнер для лінз. Очні захворювання, включаючи виразку рогівки, можуть розвиватися швидко і вести до втрати зору. Не можна залишати лінзи на ніч, якщо вони не призначені для цього і не схвалені Вашим лікарем-офтальмологом. Клінічні дослідження показали зростання ризику серйозних несприятливих реакцій, якщо не знімати лінзи під час нічного сну. Лінзи пролонгованого носіння повинні регулярно зніматися для очищення і дезінфекції або для знищення і заміни відповідно до терміну, рекомендованого Вашим лікарем-офтальмологом. Клінічні дослідження показали підвищену частоту серйозних несприятливих реакцій при порівнянні використання контактних лінз тривалого носіння і контактних лінз щоденної заміни. Дослідження показали, що ризик серйозних несприятливих реакцій збільшується для контактних лінз пролонгованого носіння під час їх очищення і дезінфекції, а також планової заміни. Дослідження також показали, що курці схильні до більш високій частоті несприятливих реакцій. Якщо Ви відчуваєте дискомфорт, надмірне сльозовиділення, зміну зору, почервоніння очей, негайно зніміть Ваші лінзи, і зв'яжіться з лікарем-офтальмологом. Користувачам контактних лінз рекомендується відвідувати лікаря-офтальмолога двічі на рік або частіше, якщо є на те причини. Ви повинні слідувати повним правилами очищення і промивання лінз, зазначеним на упаковці продукту, для правильної дезінфекції Ваших лінз і зниження ризику забруднення контактної лінзи. Результатом скорочення часу очищення і промивання можуть бути недостатньо очищені лінзи. Ви повинні наповнювати Ваш контейнер для лінз свіжим розчином кожен раз, коли ставите Ваші лінзи на зберігання і ніколи не "доливати" або не використовувати повторно розчин. Ви повинні вилити Ваш розчин одразу після того, як Ваші лінзи були витягнуті з контейнера для лінз. Ви не повинні зберігати Ваші лінзи і / або промивати Ваш контейнер для лінз водою, наприклад, водопровідною, бутильованою або дистильованою, або будь-яким нестерильним розчином. Очищайте, промивайте і сушіть на повітрі Ваш контейнер для лінз кожен раз, коли ви витягаєте з нього Ваші лінзи. Для того щоб видалити надлишки розчину, Ви можете перевернути Ваш контейнер для лінз на час просушування. Замінюйте Ваш контейнер для лінз регулярно, в залежності від Ваших гігієнічних звичок. Відмова від видалення розчину з контейнера для лінз після кожного використання або використання води для зберігання Ваших лінз може вести до забруднення лінз, яке може викликати пошкодження очей і можливу втрату зору.

Заходи перестороги:

- Завжди дотримуйтесь вказівок щодо використання продукту. Порушення наступних вказівок для продукту може призвести до втрати зору.
- Регулярно відвідуйте Вашого лікаря-офтальмолога.
- Завжди мийте і сушіть руки перед обробкою і використанням лінз.
- Не використовуйте водопровідну, бутильовану воду або сольовий розчин для лінз або контейнера.
- Використовуйте тільки свіжий розчин для очищення і дезінфекції контактних лінз.

- Завжди виливайте залишки розчину з Вашого контейнера для лінз після кожного циклу дезінфекції.
- Сольовий розчин і зволожуючі краплі не будуть дезінфікувати Ваші лінзи.
- Завжди замінюйте Ваші розчин, лінзи і контейнер для лінз відповідно до вказівок.
- Щоб уникнути забруднення, не торкайтеся наконечником флакона будь-якої поверхні. Поверніть на місце кришку після використання.
- Не використовуйте теплову (термальну) дезінфекцію.

Перестороги:

- Завжди виливайте розчин з контейнера для лінз після кожного використання.
- Зберігайте флакон щільно закритим, якщо не використовуєте розчин.
 - Зберігайте при кімнатній температурі (від + 15 ° C до + 25 ° C), уникати дії прямих сонячних променів.
- Використовуйте до дати закінчення терміну придатності, зазначеної на коробці і флаконі.
- Не використовуйте залишки розчин через 90 днів після відкриття.
- Зберігайте в недоступному для дітей місці.

Несприятливі реакції (Проблеми, і що в цьому випадку робити):

Можуть зустрічатися наступні проблеми: гострий біль в очах, опік або свербіж (роздратування), стан менш комфортний, ніж тоді, коли лінзи були вперше надіті, відчуття присутності чогось в оці (чужорідне тіло, свербіж), надмірне сльозотеча, незвичайні виділення з ока, почервоніння ока, знижена гострота зору, затуманений зір, веселки або ореоли навколо об'єктів, чутливість до світла (фотофобія) або сухість очей.

Якщо Ви помітили що-небудь з перерахованого вище

Негайно зніміть лінзи.

- Якщо дискомфорт або проблема вичерпані, уважно огляньте лінзу.
- Якщо лінза якимось чином пошкоджена, не надягайте лінзу. Покладіть лінзу в контейнер для зберігання і зв'яжіться з Вашим лікарем-офтальмологом.
- Якщо на лінзі є бруд, вія або інше чужорідне тіло або проблема вичерпана і лінза виглядає непошкодженою, ретельно очистіть, промийте і продезінфікуйте лінзу, потім надіньте її.
- Якщо проблема не вичерпана, негайно зніміть лінзу і проконсультуйтеся з Вашим лікарем-офтальмологом.

Якщо спостерігаються вищенаведені симптоми, можливо це серйозні захворювання, такі як інфекція, виразка рогівки, неоваскуляризація або ірит, проконсультуйтеся у Вашого лікаря-офтальмолога і отримайте рекомендації з лікування для запобігання більш серйозного пошкодження очей.

Гігієнічні вимоги:

- Завжди мийте і обполісуйте руки перед обробкою лінз.
- Очищайте, промивайте і дезінфікуйте Ваші лінзи кожен раз, коли ви знімаєте їх.
- Завжди обробляйте одну і ту ж лінзу, праву або ліву, першої для запобігання плутанини.
- Після використання завжди виливайте розчин і промивайте контейнер для лінз свіжим Універсальним розчином Біотру (Biotrue) і залишайте сушитися на повітрі.

Голова Представництва
«Бауш енд Ломб Б.В.»

В.В. Король